

## Решение для детей

В течение ряда лет компания «Колопласт» разрабатывала специальные средства ухода для стомированных детей. «Колопласт» предлагает решение, позволяющее стомированным детям вести такой же активный образ жизни, как и их друзья, не испытывая при этом дискомфорта. В педиатрических калоприемниках Easiflex используется технология адгезивного фланцевого соединения.

## Мягкость и удобство использования

Для приклеивания и удаления стомного мешка не требуется никаких усилий. Педиатрические калоприемники EasiFlex просты и удобны в использовании, фланец пластины можно приподнять и приклеить мешок не оказывая давления на переднюю брюшную стенку.

## Гибкость

Педиатрические калоприемники Easiflex имеют мягкое и гибкое фланцевое соединение. Пластина и мешок образуют единую мягкую эластичную конструкцию. Дети могут свободно двигаться, не испытывая неудобства от калоприемника.

## Гигиеничность и простота ухода

Пластина не имеет кромки, поэтому за ней легко ухаживать.

## Незаметность

Педиатрические калоприемники Easiflex имеют на дренажном конце встроенную застежку на липучке Hide-away. Встроенная застежка Hide-away мягкая, удобная, герметичная и гигиеничная, за ней легко ухаживать.

## Встроенный фильтр













Мешки имеют встроенный автоматический фильтр. В каждой упаковке стомных мешков находятся защитные наклейки для фильтра, необходимые для защиты фильтра во время приема водных процедур или для регулирования количества газов в мешке.

## Мягкое покрытие

После приема водных процедур просушите калоприемник полотенцем. Педиатрические калоприемники разработаны специально для детей.

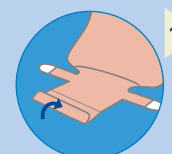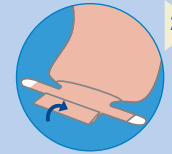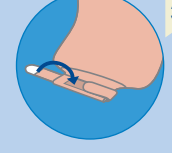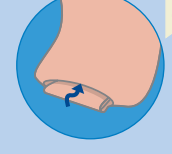
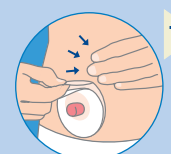
## Инструкция по применению

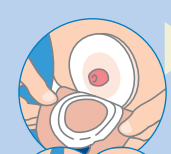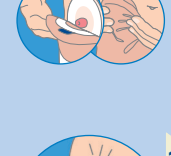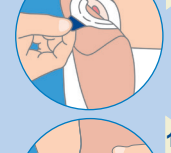-  1 Положите калоприемник на стол фланцем вниз. Загните губчатую маленькую полоску вверх большой как конверт.
-  2 2. раза заверните дренажный конец мешка на себя, пока не увидите велюровую полоску.
-  3 Герметично закройте дренажное отверстие, плотно прижав застежки-липучки (Velcro®) к велюровой полоске.
-  4 Застежку можно спрятать под мягкое покрытие мешка. Стомный мешок становится практически незаметным.
-  5 **Подготовить пластину**  
Определите размер стомы с помощью приложенного шаблона для измерения стомы. Отметьте размер и форму стомы на защитном покрытии адгезивной пластины. Отверстие в пластине отсутствует. Для вырезания рекомендуется использовать ножницы с изогнутыми концами. (Отверстие вырезается внутри фланца в середине пластины.)
-  6 **Наклеить пластину**  
Убедитесь, что кожа вокруг стомы чистая и сухая. Удалите защитную пленку. Наложите пластину вокруг стомы. Чтобы обеспечить надежное приклеивание, тщательно разгладьте пластину снизу вверх, плотно прижимая ее к коже.
-  7 **Удалить пластину**  
Удалите пластину, медленно отклеивая ее сверху вниз, потягивая за ушко пластины, при этом другой рукой натягивайте кожу живота.
-  8 **Подготовить стомный мешок**  
Убедитесь, что пластина чистая и сухая. (Пластина следует протирать салфеткой, используя только воду). Снимите защитное покрытие с клеевого (адгезивного) фланца стомного мешка. Не растягивайте клеевой (адгезивный) губчатый фланец стомного мешка.
-  9 **Наклеить стомный мешок**  
Аккуратно наложите фланец мешка снизу на фланец пластины. Не натягивая адгезивный фланец мешка аккуратно приклейте мешок к пластине. Чтобы обеспечить надежное приклеивания вокруг стомы слегка прижмите мешок и пластину к коже.
-  10 **Удалить стомный мешок**  
Придерживая пластину одной рукой, другой рукой удалите мешок, аккуратно и медленно потягивая его за синее ушко.
-  11 **Дренаж (опорожнение) стомного мешка**  
Расстегните застежку-липучку (Velcro®), разверните дренажный конец мешка и аккуратно опорожните стомный мешок, придерживая его руками.
-  12 **Уход за дренажным отверстием**  
Тщательно протрите дренажный конец калоприемника салфеткой или туалетной бумагой. Отогните маленькую полоску назад за большую. Протрите края полосок. Если дренажное отверстие чистое, его можно снова закрыть. **Закрытие мешка** (см. п. 1)